


Phago'Spray DASR 70

Réf.643715 - Christeyns

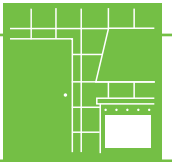

Désinfectant hydroalcoolique sans rinçage pour les mains et les surfaces.

Large spectre antimicrobien dès 30 secondes.

Contact alimentaire, sans rinçage. Sans trace, ni résidu au séchage.



INDICATION

- **PHAGO'SPRAY DASR 70** est un désinfectant hydroalcoolique pour la désinfection des mains, des surfaces, des équipements et des mobiliers propres.

- Sans trace, ni résidu sur les surfaces. Il peut être utilisé en application sur une lavette à usage unique pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs (table d'opération, éclairage opératoire, moniteurs, câbles et connectiques, stéthoscopes, marteaux à réflexe, tensiomètres) et des petites surfaces proches du patient.

- Le **PHAGO'SPRAY DASR 70** peut être utilisé, sans rinçage sur les surfaces pouvant se trouver en contact direct avec les denrées alimentaires (table, plan de travail, plateaux, chariot de repas, trancheurs, hachoirs, couteaux...).



COMPOSITION

- **Actifs désinfectants :**

- Alcool éthylique (N°CAS 64-17-5 : 72% m/m).
- Contient aussi : Eau, isopropanol, tert-butanol, acide sorbique.
- 96% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.



CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : Liquide limpide incolore.
- Odeur : alcool.
- pH (20°C) : 4,0 – 7,0.

MODE D'EMPLOI

- Le **PHAGO'SPRAY DASR 70** est prêt à l'emploi.

- Pulvériser sur une lavette à usage unique et appliquer sur la surface à désinfecter. Ne pas rincer.
- Pulvériser directement sur les surfaces préalablement nettoyées à une distance de 20 à 30 cm à raison de 15 à 20 mL/m².
- Laisser agir 2 minutes pour avoir un spectre de désinfection complet, ou selon l'activité souhaitée.
- Fréquence d'application : se référer au plan d'hygiène défini.

TP1 - Produits biocides destinés à l'hygiène humaine.

TP2 - Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

TP4 - Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Pulvérisateur 750ml

N° Produit : 643715

Carton de 6 pulvérisateurs

H
Y
G
I
È
N
E

D
É

L
A

C
U
I
S
I
N
E

Phago'Spray DASR 70

Réf.643715 - Christeyns



ACTIVITÉS MICROBIENNES

Activités microbiennes		Temps d'action
Bactéricide	EN 1276	30 s
	EN 13727+A2	30 s
	EN 13697 dont <i>L. monocytogenes</i> et <i>S. enterica</i>	2 min
	EN 16615	1 min
	EN 17387	2 min
	EN 1500 (3mL)	30 s
Fongicide	EN 1650	1 min
	EN 13624	1 min
	EN 13697+A1	1 min
	EN 16615	2 min
	EN 17387	2 min
Mycobactéricide	EN 14348	1 min
Virucide	EN 14476+A2 sur Poliovirus	1 min
	EN 14476+A2 sur Adenovirus, Norovirus et Vaccinia virus	30 s
	EN 16777 sur Adenovirus et Norovirus	1 min


CHRISTEYNS




ECODÉTERGENT

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Dangereux. Produit réservé à un usage professionnel.

- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.

- Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animale et pour l'environnement.

- Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT «Ecodétergent» disponible sur <http://detergents.ecocert.com>

H
Y
G
I
È
N
E

D
E

L
A

C
U
I
S
I
N
E